




WOLNOŚĆ OD HORMONÓW

Wolność bycia sobą


Multi-Safe[®]

Multi-Safe®

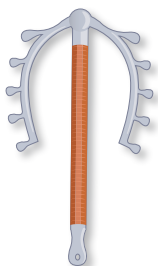

Multi-Safe

dla kobiet o macicy przeciętnej
wielkości (> 6 cm)

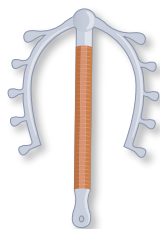

Multi-Safe short

dla kobiet o mniejszej
macicy (< 6 cm)

Multi-Safe (short) antykoncepcja niehormonalna

Multi-Safe to skuteczna miedziana wkładka domaciczna pozbawiona hormonów, idealna dla kobiet, które wybierają antykoncepcję niehormonalną. Naturalny cykl zostaje zachowany, a Ty możesz beztrudnie się kochać. Wkładka Multi-Safe ma kształt podkowy i jest wykonana z tworzywa sztucznego i miedzi. Działa skutecznie przez pięć lat. Spirale Multi-Safe można też stosować jako antykoncepcję awaryjną, jeśli zostanie założona w ciągu pięciu dni od seksu bez zabezpieczeń. Holenderskie Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych zaleca zarówno miedzianą wkładkę w kształcie litery T (T-Safe), jak i w kształcie podkowy (Multi-Safe).

Działanie i zakładanie

Multi-Safe to wkładka łatwa do założenia przez lekarza rodzinnego, położną lub ginekologa. Działanie wkładki:

- Miedź paraliżuje plemniki i zapobiega zapłodnieniu komórki jajowej.
- Miedź uniemożliwia komórce jajowej zagnieżdzenie się w ścianie macicy.

Bezpośrednio po jej założeniu, wkładka zaczyna wydzielać niewielką ilość miedzi, co zapewnia pięcioletnią ochronę przed zajściem w ciążę.

Wizyta kontrolna

Na sześć tygodni po założeniu wkładki umów się na wizytę kontrolną w gabinecie. Pracownik medyczny sprawdzi, czy spirala znajduje się na właściwym miejscu. Możesz z nim też omówić ewentualne dolegliwości.

W jakich przypadkach użycie Multi-Safe jest niewskazane?

- niewyjaśnione krwawienie z pochwy
- trwające zapalenie narządów płciowych
- nieprawidłowa budowa macicy
- choroba Wilsona
- alergia na miedź
- ciąża



Działania niepożądane

Przez pierwsze trzy miesiące po założeniu wkładki menstruacja może przebiegać inaczej niż zwykle. Większość kobiet nie odczuwa dyskomfortu lub odczuwa jedynie niewielki dyskomfort związany z wkładką. Inne mogą doświadczać działań niepożądanych, tj.:

- obfite, długotrwałe lub nieregularne miesiączki;
- (niekiedy silne) skurcze brzucha;
- krwawienia między miesiączkami.

Po około trzech miesiącach Twoje ciało przyzwyczai się do wkładki i naturalny cykl miesięczkowy się ureguje. U niewielkiej liczby kobiet na stałe nieznacznie zwiększa się obfitość krwawienia podczas miesiączki.

Multi-Safe jest mniej odpowiednia dla kobiet, które z natury mają obfite, a przez to uciążliwe miesiączki.

Użycie kubeczka menstruacyjnego

Z badań wynika, że kobiety częściej tracą spiralę, jeśli używają kubeczka menstruacyjnego. Nie zaleca się więc stosowania go w połączeniu z wkładką domaciczną.

Jeśli jednak chcesz używać kubeczka menstruacyjnego, zacznij dopiero trzy miesiące po założeniu wkładki. Przerwij próżnię przed wyjęciem kubeczka, nie ciągnij za sznureczki spirali i zawsze sprawdzaj, czy spirala nie wpadła do kubeczka.

Zamówienia

Wkładkę Multi-Safe można kupić w aptece.

Możesz też zamówić Multi-Safe online na stronie : www.titushealthcare.nl/shop.

Ten folder stanowi uzupełnienie ulotki dla pacjenta. Przed założeniem Multi-Safe zawsze najpierw zapoznaj się z ulotką dla pacjenta.

ANTYKONCEPCJA NIEHORMONALNA

NA CAŁYM ŚWIECIE **180** MILIONÓW KOBIET
UŻYWA MIEDZIANEJ
WKŁADKI DOMACICZNEJ

SKUTECZNOŚĆ **>99%**

5 LAT ZABEZPIECZENIA

20% KOBIET W HOLANDII
WYBIERA WKŁADKĘ



Aalsmeerderdijk 158C
1438 AX Oude Meer
info@titushealthcare.nl
www.titushealthcare.nl

WWW.MULTI-SAFE.NL