

carevix™

Het zachte, vrouwvriendelijke
alternatief voor de aanhaaktang




Gebruikersinstructie

TITUS
Health Care




Monteer Carevix

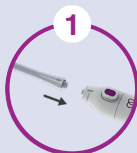

Sluit de zuigkop aan op het handvat.



Zorg ervoor dat de merktekens gelijk staan.

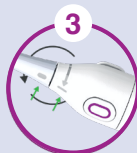

Draai het handvat rechtsom tot het stopt.



Stap 1 Creëer het vacuüm




Controleer de knop: de ovale paarse knop moet naar boven staan.



Trek de zuiger uit het handvat tot het stopt en een pijl zichtbaar wordt.




Draai de zuiger voorzichtig in de richting van de pijl totdat de merktekens gelijk staan.

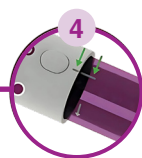

Stap 2 Pak de cervix vast

LET OP: Maak de cervix eerst goed droog!

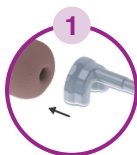

Bepaal de hoek van de uterus om de correcte plaatsing van de zuigkop vast te stellen.



Plaats de zuigkop stevig op de cervix om een goede aansluiting te maken.



Duw de knop naar beneden om het vacuüm te leveren.



Wacht 10 seconden!



Wacht 10 seconden om het weefsel in de zuigkop te laten komen.

Trek daarna in een rustige beweging en in één rechte lijn.




Stap 3 Laat de cervix los



Stop tractie op de cervix.



Druk de knop terug naar boven om het vacuüm op te heffen.

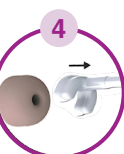

Verwijder de zuigkop uit de vaginaholte.



Indien nodig: resetten van Carevix



Druk de ovale paarse knop naar beneden.




Draai de zuiger om te ontgrendelen.




Duw de zuiger terug in het handvat om Carevix te resetten.

Informatie en advies bij gebruik Carevix

Carevix kan in verschillende posities op de cervix worden geplaatst (op 12 uur, 3 uur, 6 uur of 9 uur).

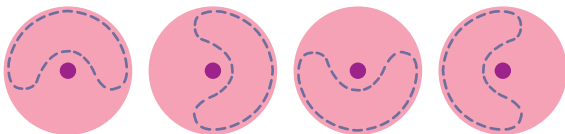

Voeg aan een insertiesysteem van een spiraal 1 cm toe aan de gemeten uteruslengte. Dit komt overeen met de diepte van de zuigkop van Carevix.

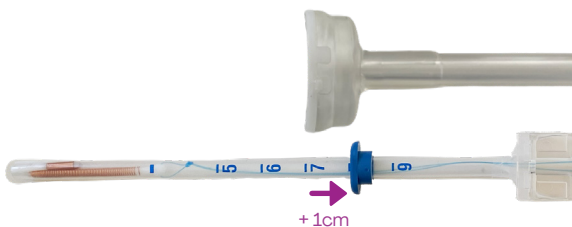


Zorg voor volledig contact met de cervix.
Bij (lucht-)geluid is het vacuüm verbroken en dient Carevix gereset te worden.



Carevix mag meerdere malen bij dezelfde patiënt gebruikt worden tijdens dezelfde procedure.

Inhoud verpakking:

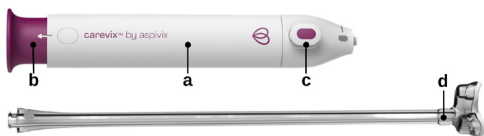

a=handvat

b=zuiger

c=knop

d=zuigkop

Let op: Check of de diameter van de cervix minimaal 26 mm is.



21 mm diameter



26 mm diameter



30 mm diameter



carevix™





Deze informatiefolder bevat een verkorte gebruikersinstructie. Titus Health Care adviseert zorgverleners een praktische training te volgen voor een veilige en effectieve toepassing van Carevix.. Neem contact met ons op of scan de QR-code om een training op locatie aan te vragen.

Titus Health Care is exclusief distributeur van Carevix in de Benelux.

Voor meer informatie over Carevix:

titushealthcare.nl | titushealthcare.be

Scan de QR-code om een Carevix training aan te vragen.



THC_NLBE_FL_042025



Titus Health Care
Aalsmeenderdijk 158 C
1438 AX Oude Meer, Nederland
0031 20 7220825 | info@titushealthcare.nl